



AquaSplint® Thermo und Mini –

selbstadjustierende und individualisierbare
CMD Aufbiss-Schienen

Die Vorteile gegenüber klassischen Aufbiss-Schienen

 Schnelle Schmerzlinderung und Muskelentspannung	 Sofort einsetzbar ohne Laborarbeiten	 Universelle Größe und dadurch universell einsetzbar	 Passgenau und komfortabler Halt
 Tragedauer von 4 Wochen / 10 Stunden pro Tag ausreichend	 Keine Adjustierungstermine (dank des hydrostatischen Ausgleichs der beiden Wasserklissen)	 Ersetzt die Relaxierungs- und Distractionsschiene	 Kann während einer kieferorthopädischen Behandlung eingesetzt werden



AquaSplint® Thermo und Mini sind selbst-adjustierende und individualisierbare vorgefertigte CMD Schienen, welche in wenigen Minuten ohne Laborarbeiten, Abdrücke oder Registrierung eingesetzt werden können. Sie bestehen aus zwei durch einen Schlauch verbundene Wasserklissen (Hydrostatische Aqua-Balance). Sie sind auch während einer kieferorthopädischen Behandlung (Brackets / Aligner) einsetzbar.

1. AquaSplint® Thermo mit Brackets
2. AquaSplint® Thermo mit Alignern
3. AquaSplint® Mini mit Brackets

Der Unterschied zwischen dem AquaSplint® Thermo und Mini

AquaSplint® Thermo	AquaSplint® Mini
Höhe 3 mm: optimal für Patienten mit tiefem Biss	Höhe 1.5 mm: optimal für Patienten mit Kopfbiss / offenem Biss
Wird mit Hilfe der unter dem Sattel angebrachten Unterfütterung individualisiert	Besitzt keine/n Sattel / Unterfütterung und wird durch Anpassung des im Tube befindlichen Stahlbogens individualisiert

Indikationen:

1. Schnelle Schmerzlinderung und Muskelentspannung
2. Optimale Initialbehandlung bei CMD
3. Differentialdiagnostik der multifaktoriellen Genese von CMD
4. Unterstützende Therapie bei Erkrankungen wie HWS-Syndrom, Tinnitus, Migräne, Stress, Trauma, Operationen, Limitationen und Blockaden (CMD hat eine multifaktorielle Genese – die Malokklusion ist nicht immer die Hauptursache)
5. Einfache präprothetische / präkieferorthopädische Bissbestimmung
6. Neutralisiert Funktionsstörungen, Frühkontakte, Zwangsbisse

Kontraindikationen:

1. Starker Bruxismus / Knirschen reduziert die Haltbarkeit
2. Durch scharfe Kanten an Prothesen, Zahnkronen o.ä. können die Wasserklissen beschädigt werden (eine Tiefziehfolie in der Stärke von 0,5 mm im Gegenkiefer kann Abhilfe schaffen)
3. Fehlen der Backenzähne – mindestens ein zweiter Prämolare (5er) in jedem Quadranten sollte vorhanden sein

Bestellübersicht

Artikel-Nr.	Inhalt	Beschreibung
406-0001	1	AquaSplint® Mini
406-0002	1	AquaSplint® Thermo

Erfinder:

Dr. Aladin Sabbagh



Hersteller:

PLASTYLE GmbH
Lessingstraße 5
91080 Uttenreuth
Telefon: +49 (0)9131 9402406
info@plastyle.de

Distributed by:

FORESTADENT

Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim
Telefon: +49 (0) 7231 459-0
Fax: +49 (0) 7231 459-102
www.forestadent.com
info@forestadent.com

**FORESTADENT**[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS