



Cerámica.  
Una clase por sí misma.

TruKlear<sup>®</sup>, el bracket autoligable totalmente estético sin metal y sus alternativas más bellas.

# Sus expectativas son las más altas. Un motivo más para darle lo mejor.

*En FORESTADENT, nos planteamos retos constantes para cubrir sus altas expectativas. Tras un largo periodo de intenso desarrollo, surge ahora un bracket especial totalmente estético elaborado 100 % sin metal. Una estrella del firmamento estético, un hito de la perfección.*

*Con él, TruKlear® completa una línea que seguimos de forma consecuyente desde hace años: ofrecerle para sus pacientes más exigentes unos brackets con los que consiga una sonrisa naturalmente perfecta de forma rápida y cómoda. Déjese sorprender por la forma en que TruKlear® cumple con todos sus requisitos estéticos y brinda el máximo cuidado a sus pacientes con nuestros brackets cerámicos alternativos de calidad demostrada QuickKlear® y GLAM®.*





# Noble. Único. Sin metal. TruKlear® hace de la estética una realidad.


*Ya puede satisfacer a la perfección las máximas exigencias estéticas. FORESTADENT pone a su disposición el primer bracket SL del mundo con cuerpo y cierre de cerámica 100 % sin metal. Así pues, TruKlear® se adapta de forma óptima al color del diente gracias a su translucidez sin que llame la atención ni una sola pieza de metal. Además de su particular aspecto, sus pacientes disfrutarán también de la extraordinaria eficacia de este bracket: su diseño garantiza una buena transmisión del torque y rotación. Su cualidad de autoligado hace que su manipulación sea rápida y sencilla, además de otras muchas ventajas. Sin embargo, el mejor motivo para decidirse por TruKlear® salta a la vista: no se puede tener una sonrisa más perfecta. Sus pacientes se lo agradecerán.*


# TruKlear®. Todo ventajas.

*Cuerpo de cerámica translúcida con bordes redondeados para una gran comodidad*

*Bordes redondeados y cuatro aletas de contacto en el slot reducen los efectos de notching and binding.*

*El slot de cuatro paredes tiene un diseño especialmente bajo para introducir arcos con una altura de 0,025" de forma ajustada y obtener una buena transmisión de rotación y torque.*

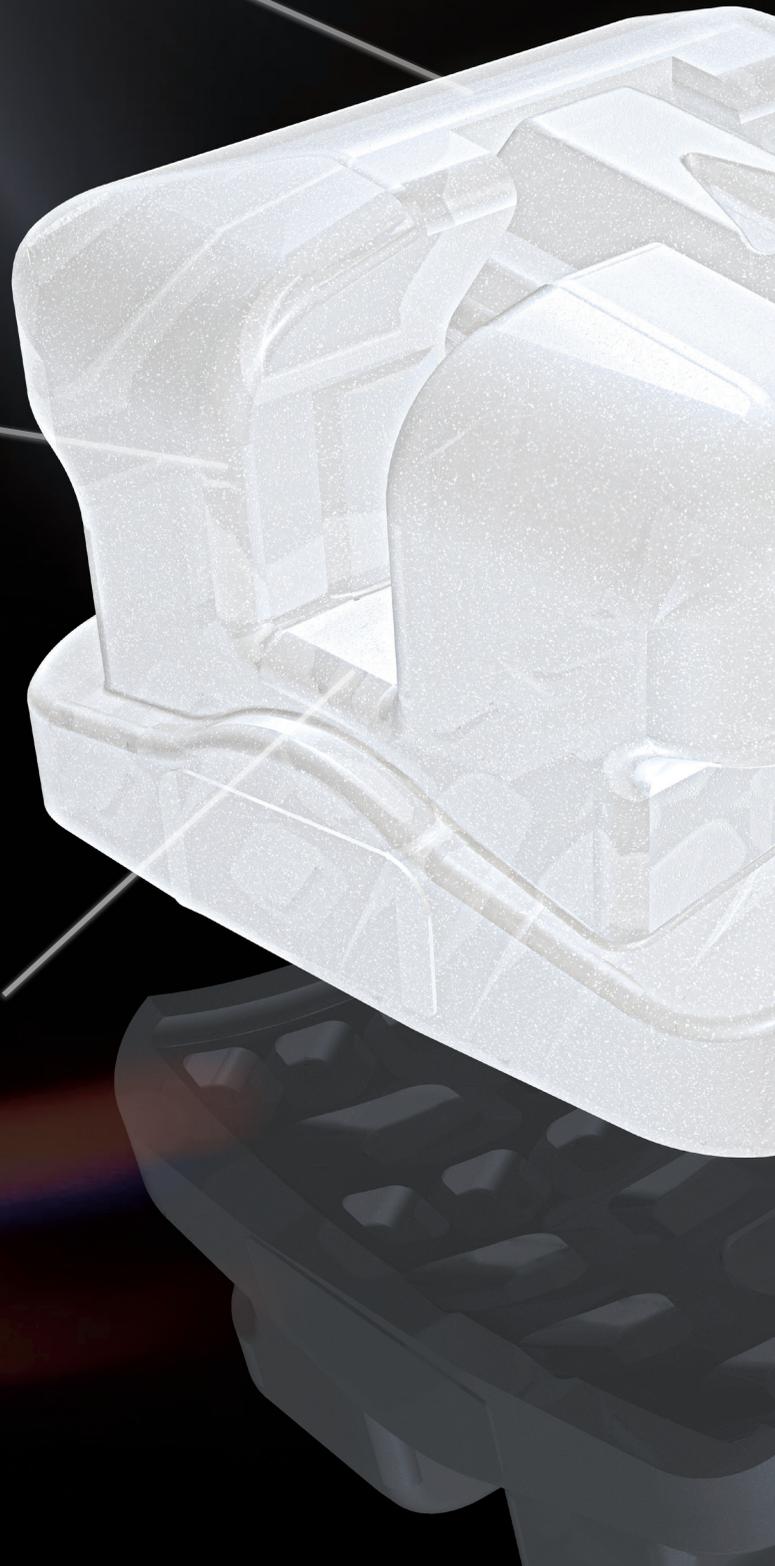

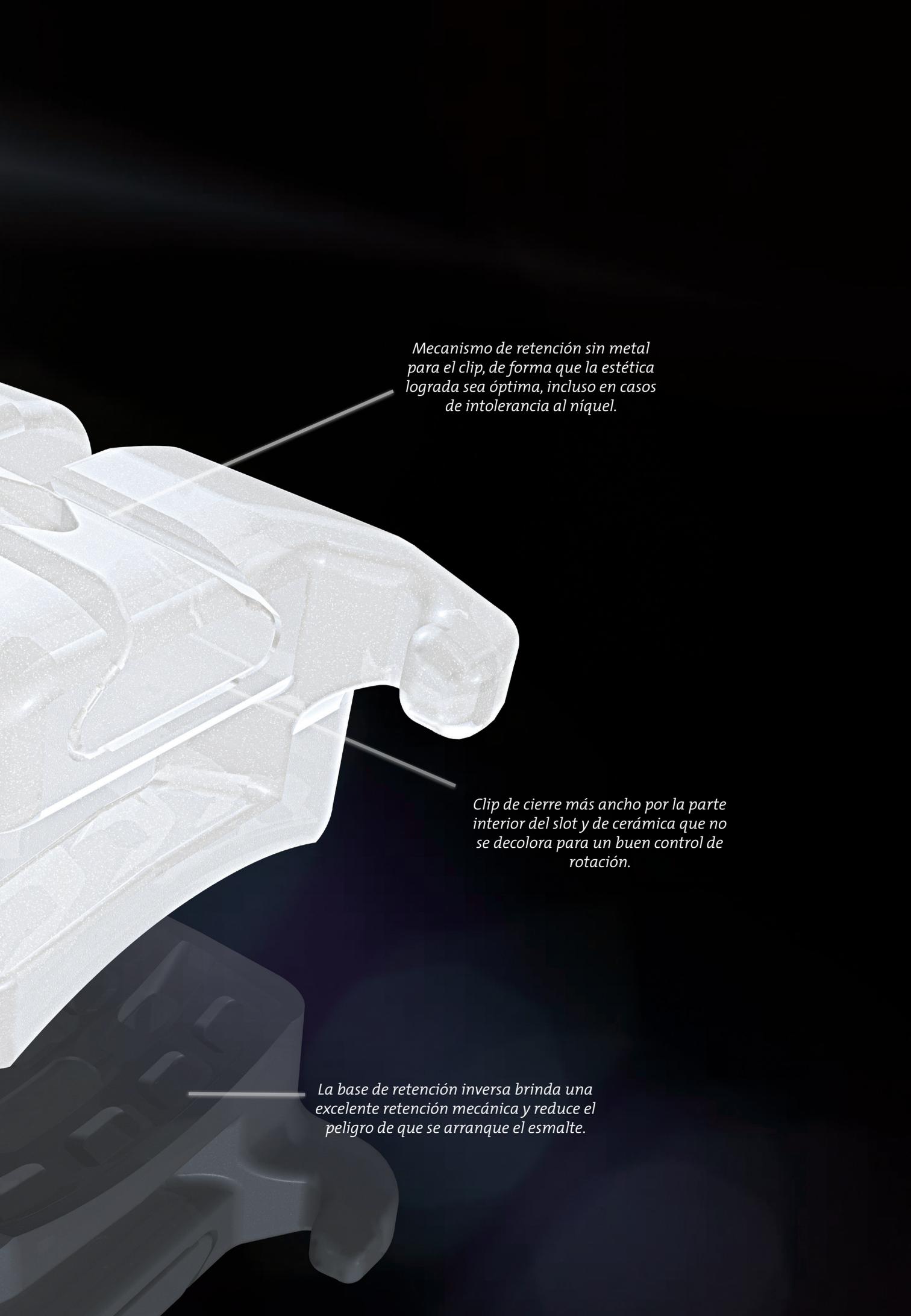

*Mecanismo de retención sin metal para el clip, de forma que la estética lograda sea óptima, incluso en casos de intolerancia al níquel.*

*Clip de cierre más ancho por la parte interior del slot y de cerámica que no se decolora para un buen control de rotación.*

*La base de retención inversa brinda una excelente retención mecánica y reduce el peligro de que se arranque el esmalte.*



# Una estética nunca vista.

TruKlear® destaca en toda su línea.

- *Totalmente estéticos: una novedad con cuerpo y corredera de cerámica.*
- *100 % sin metal: nada interfiere con la estética y el bracket es adecuado para alérgicos al níquel.*
- *Cierre más ancho: el clip es más ancho en el lado del slot para obtener una buena transmisión de la rotación.*
- *Limpieza segura: El clip se abre hacia gingival, lo que protege el cierre de posibles daños al masticar y de la acumulación de restos de comida.*
- *Slot más bajo: los arcos con un altura de 0,025" se introducen ajustados. De esta forma se garantiza la buena transmisión del torque.*
- *Translúcidos: se adaptan a la perfección al color del diente y no cambian de color.*
- *De autoligado: como bracket de autoligado, TruKlear® garantiza la manipulación rápida y sencilla.*
- *TruKlear® cuenta con la base de retención inversa desarrollada por nosotros como resultado del estudio de la curvatura natural de más de 4.000 dientes de todo el mundo.*
- *Óptima retención: la base de retención inversa garantiza una perfecta retención mecánica.*
- *Baja fricción: los bordes redondeados minimizan la fricción, cuatro aletas de contacto en el slot evitan los efectos de binding y notching.*
- *Remoción sin astillados ni roturas. Resulta muy fácil con el instrumento especial del Dr. Pauls.*
- *Fácil de aplicar: El bracket está disponible para maxilar y mandíbula 5-5.*
- *Fabricado 100 % en Alemania: confíe en nuestro elevado compromiso de calidad.*





# Discreción para atraer todas las miradas.

Brackets QuicKlear® III. Rápidos, discretos y más cómodos que nunca.



La variante estética de la familia Quick se llama QuicKlear® III. Gracias a su cerámica translúcida, este bracket es muy discreto y, a la vez, extremadamente eficaz. Con el bracket activo, sus pacientes podrán dejarse ver en cualquier situación. Además, ahorrará tiempo, ya que gracias a la mecánica de cierre de eficacia probada, las sesiones de tratamiento nunca son prolongadas. La tercera generación de QuicKlear® incluye novedades decisivas: QuicKlear® III es más plano que su predecesor y, gracias a los cantos redondeados, resulta más cómodo para el paciente. La nueva forma del clip de cierre proporciona una mejor transmisión de rotación, angulación y torque. QuicKlear® III también está disponible para el maxilar inferior 5-5 para una total discreción. Muchos detalles que dicen mucho del QuicKlear® III y que dibujarán una sonrisa radiante en el rostro de sus pacientes.

- Cerámica translúcida: nuestro material cerámico de desarrollo propio y totalmente discreto.
- Completo: QuicKlear® III también está disponible para el maxilar inferior y superior 5-5.
- Nueva forma: perfil notablemente más bajo, bordes del bracket mucho más redondeados para la mayor comodidad del paciente.
- Nuevos clips de cierre: los clips de cromo-cobalto son color mate en lugar de brillantes y, por tanto, mucho más discretos gracias a su tratamiento superficial. La nueva forma del clip mejora la transmisión de fuerza.
- Cómodo: fácil apertura y cierre de los clips ejerciendo presión incluso con el dedo para que su uso sea de lo más sencillo.
- Base más resistente: con la base de retención de desarrollo propio e invertida para brackets de cerámica, QuicKlear® III se adhiere de forma puramente mecánica y de una manera excelente al diente, a la vez que reduce el riesgo de desprendimiento accidental del esmalte como sucede con otros brackets cerámicos.
- Adaptación óptima: según los resultados de los estudios realizados en 4.000 dientes, la base del bracket se ha adaptado de forma que se ajustara a la perfección a todas las formas dentales.
- Fácil de descementar: con la herramienta de Pauls, el bracket puede descementarse de forma segura y sin astillas.

# ¿Se puede impresionar sin glamour?

Naturalmente con GLAM®.




*Tener siempre un buen aspecto es el motivo principal por el que muchos pacientes se deciden por los brackets cerámicos. GLAM® tiene la capacidad de convencer a cualquiera por su cerámica extremadamente translúcida que se adapta a la perfección al color del diente. Su aspecto es totalmente suave y mate, sin reflejos y discreto. Su base de diseño minimalista apenas descompone la luz y hace que el bracket de ligado convencional resulte especialmente transparente. Así respondemos a unas expectativas superiores de estética total. El slot y los bordes del slot están redondeados, por lo que la fricción es menor. El descementado también le llevará menos tiempo y le aportará más tranquilidad. Con la herramienta de Pauls, puede extraer los brackets fácilmente en tan solo un paso y sin astillados ni roturas. ¿Puede ser tan hermoso el glamour? Con GLAM®, por supuesto.*

- *Alta estética: los brackets, extremadamente translúcidos, se adaptan a la perfección al color del diente.*
- *Más bello: acabado mate en lugar de reflejar la luz. También con superficies mojadas.*
- *Se puede ligar de la forma convencional: de calidad demostrada y fiable, el bracket es aún más discreto.*
- *En una pieza: las fuerzas clínicas se transmiten del slot a la base con eficacia y precisión sin pérdida del par de apriete.*
- *No se decolora: no contiene ninguna pieza de resina.*
- *Fácil de descementar: con la herramienta de Pauls, los brackets se extraen sin astillados ni roturas.*
- *Fácil de aplicar: El bracket está disponible para maxilar y mandíbula 5-5.*




# Fácil de colocar. Fácil de extraer.

Nuestro instrumental hace que todo sea más fácil.

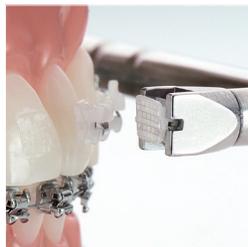

La herramienta de Pauls para el descementado sin astillado

*TruKlear®*, *Quicklear® III* y *GLAM®* tienen muchas ventajas en común. Resultan fáciles de colocar y consiguen para sus pacientes una bonita sonrisa en muy poco tiempo. Son igual de fáciles de extraer, con la herramienta de Pauls. Esta herramienta especial que solo fabricamos nosotros, es fácil de usar y se utiliza inclinando hacia mesial o distal. No daña ni los valiosos brackets, ni el aún más valioso esmalte dental. Sin astillados, ni roturas. Al final del tratamiento, o si desea reposicionar un bracket antes de que termine, haga lo siguiente: coloque la herramienta de Pauls, extraiga el bracket, bañe con arena y vuelva a adherir. Nada más. No hay nada más sencillo y seguro.

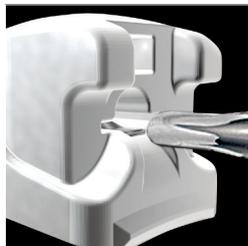

Los brackets *Quicklear®* pueden abrirse desde gingival y desde vestibular. El clip se mueve hacia oclusal.

Abrir también es muy fácil con nuestra herramienta. Como brackets de autoligado, *TruKlear®* y *Quicklear® III* se pueden abrir fácilmente con un instrumento de apertura clásico.



Los brackets *TruKlear®* se abren desde vestibular. El clip se desliza hacia gingival.





# mejor sea la combinación, más estético será el resultado.

Así es como los brackets bucales y linguales logran el éxito conjunto.



Nuestros brackets cerámicos están disponibles para el maxilar superior e inferior, por lo que permiten obtener una estética integral perfecta, tal y como se puede ver en el ejemplo de TruKlear® de la izquierda. En determinadas situaciones clínicas, la combinación con brackets linguales en el maxilar inferior puede resultar muy útil. Especialmente en el caso de pacientes con sobremordida, existe el riesgo de que los dientes del maxilar cierren sobre los brackets de la mandíbula. Puesto que la cerámica es más dura, en el peor de los casos podría dañar el esmalte dental. Por lo tanto, en este caso se recomienda combinar brackets bucales en el maxilar con brackets linguales en la mandíbula. La combinación de dos técnicas totalmente distintas ofrece ventajas adicionales:

- Los brackets pueden cementarse sin compromiso ni interferencias sin necesidad de aparatos de apertura oclusal.
- Permite la posición muy incisal de la parte anterior de la mandíbula para un nivelado rápido y eficaz.
- Los brackets linguales se pueden colocar a la perfección en el centro de resistencia del diente para evitar los momentos de protrusión.
- El tratamiento de la mandíbula puede empezar sin que tenga que haber concluido la fase de nivelación del maxilar.



*Para esta práctica combinación, resulta idóneo nuestro Bracket Lingual 2D. Tanto usted como sus pacientes disfrutarán de sus ventajas:*

- El bracket más plano del mercado (entre 1,3 y 1,65 mm de alto) para mayor comodidad del paciente.*
- Autoligado para una fácil manipulación.*
- El 2D Lingual se toma directamente de las existencias de la clínica, ya que no tiene que elaborarse de forma individual.*
- Los odontólogos con más práctica pueden realizar ellos mismos todos los pasos de trabajo sin necesidad de externalizar servicios.*
- Doble aleta para una buena transmisión de angulación y rotación.*
- Cuatro variantes distintas.*



*Mini Ants® - especialmente fino para el uso prematuro y en espacios muy estrechos*



*2D Plus con slot parcialmente cuadrado para realizar el par de torsión de cada diente de forma individual*



*2D con gancho en T – para el uso de cadenas elásticas*

# Los brackets más bellos también se merecen los arcos más bellos.

Del color del diente y siempre blancos: Nuestros arcos BioCosmetic®.



*Si utiliza brackets de alta calidad para sus pacientes, debería ser natural que utilizara también arcos de alta calidad. Para los brackets estéticos, existen los arcos BioCosmetic® de FORESTADENT.*

*Su núcleo está hecho de NiTi, la aleación inteligente de níquel-titanio que hace que los arcos conserven su forma especialmente bien y resulten superelásticos. De esta forma, su uso será eficaz y resultarán cómodos de usar.*

*La termosensibilidad de los BioAlambres hace que el tratamiento sea aún más agradable para sus pacientes. Podrán darse un respiro con bebidas o comidas frías.*

*El revestimiento de teflón de uso sanitario del color del diente hace que sea muy discreto y reduce al mínimo la fricción. Además, el teflón es hidrófobo y no se decolora con la comida y la bebida. Están disponibles como arcos cuadrados y redondos para que siempre cuente con el arco adecuado para sus pacientes.*

