



Track[®]
Láminas de Termoformado

www.forestadent.com

FORESTADENT[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

TRACK® Láminas de termoformado



¡Un procesamiento más rápido gracias a la lámina aislante integrada!

Evite varias operaciones durante el procesado de láminas Track® A y B: El aislamiento de modelado o la embutición de una lámina incorporada por separado y la posterior perforación manual se eliminan, ya que el Track® A y B tienen integrada una lámina aislante.



¡Sin necesidad adhesivos!

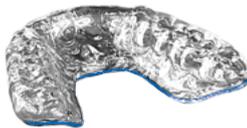
Las láminas Track® A y Track® B no requieren adhesivos para la aplicación del material de acrilato (Forestacryl).



¡Una mejor combinación de láminas para posicionadores, férulas antirronquidos!

Las láminas Track® E presentan una mejor composición de materiales que las láminas similares. Las láminas Track® E garantizan una combinación de láminas más estable (después del calentamiento) en dispositivos intermaxilares como posicionadores y férulas antirronquido.

Ø 125 mm, transparente

Order No.	Grosor	Contenido		Descripción	Campo de aplicación	Acrylic
408-0105	0.5 mm	100		Track® A duro (PETG)	Férulas de mordida, bruxismo* y estabilización, férulas de corrección (alineadores), férulas anti ronquido *para la fabricación de férulas de bruxismo sólo deben ser usadas hojas de grosor mayor o igual a 1 mm	sí
408-0106	0.6 mm	100				
408-0108	0.8 mm	100				
408-0110	1.0 mm	100				
408-0115	1.5 mm	50				
408-0120	2.0 mm	50				
408-0220	2.0 mm	30		Track® B Doble capa (TPU/PET-G)	Férulas de mordida, bruxismo, férulas de corrección (alineadores) y férulas anti ronquido	sí (en la cara dura)
408-0305	0.5 mm	100		Track® C placas blandas (PE)	Marcador de posición para portador de medicamentos, férulas de blanqueamiento en combinación con un molde duro	no
408-0310	1.0 mm	100			Capa interna de férulas de transferencia, en combinación con férula dura	
408-0515	1.5 mm	50		Track® E placas blandas de goma (EVA)	Férula suave. Capa interna de férula de transferencia para brackets, en combinación con férula dura	no
408-0520	2.0 mm	50			Posicionadores, férulas suaves, protectores de brackets	
408-0530	3.0 mm	30				
408-0610	1.0 mm	100		Track® bleach (EVA)	Férulas de blanqueamiento y fluorización, en combinación con lámina de marcado de posición	no

TRACK[®]-V Unidad de termoformado al vacío

Order No.		Contenido	Descripción
900-2000		1	Track[®]-V Unidad de termoformado al vacío, 230 V
900-2110		1	Track[®]-V Unidad de termoformado al vacío, 100 V, Japan
900-2115		1	Track[®]-V Unidad de termoformado al vacío, 115 V, USA

TRACK[®]-P y TRACK[®]-P-ci – Maquina de termoformado de presión (con / sin compresor integrado)

Order No.		Contenido	Descripción
900-2300		1	Track[®]-P Maquina de termoformado de presión, 230 V
900-2310		1	Track[®]-P Maquina de termoformado de presión, 100 V, Japan
900-2315		1	Track[®]-P Maquina de termoformado de presión, 115 V, USA
900-2400		1	Track[®]-P-ci con compresor integrado Maquina de termoformado de presión, 230 V
900-2410		1	Track[®]-P-ci con compresor integrado Maquina de termoformado de presión, 100 V, Japan
900-2415		1	Track[®]-P-ci con compresor integrado Maquina de termoformado de presión, 115 V, USA

TRACK®-V – Materiales auxiliares

Order No.	Descripción		Contenido
408-0705	Plantilla de cobertura para granulado (4 medidas x 2 piezas)		1
408-0706	Occluform para el Track®-V		1
900-2001	Granulado de acero 1,3 kg		1
900-2002	Bloqueador de yeso, 400 gr.		1
900-2003	Bloqueador transparente de cera, 50 gr.		1
900-2012	Brocha con imán para granulado		1
900-2016	Anillo de sellado de recepción para láminas de termoformado		1
900-2017	Anillo de sellado para recipiente de formado		1
900-2018	Set de acabado para láminas de termoformado Track® para cortar y fabricar las férulas		1
900-2006	Para recoger el granulado de relleno		1
900-2007	Anillo tensor de láminas para sujetar las láminas en el registro de láminas		1
900-2008	Recipiente colector de granulado		1
900-2010	Disco de modelado		1
900-2011	Olla granulada		1

TRACK®-P y TRACK®-P-ci – Materiales auxiliares

Order No.	Descripción		Contenido
900-2301	Anillo tensor de láminas		1
900-2302	Soporte para láminas		1
900-2303	Pot de termoformado		1
900-2304	Cepillo con capuchin de goma para granulado de acero		1
900-2305	Granulado de acero 1,3 kg		1